

seca 416 – Csecsemő hossz mérő 33 – 100cm-ig

A csecsemőhossz-mérő a Magyarországon régen rendszeresített „vályú” formatervezett változata.

Műszaki jellemzői:

Mérési tartomány:

33 – 100 cm \pm 2 mm

Súlya: 3,2 kg.

A mérés cm-ben és inch-ben is lehetséges.

A mérőeszköz használata:

Mielőtt az eszközt használatba veszi, kérjük tanulmányozza át a Gyári használati útmutatót, ahol ábrák segítik a helyes használatot.

Fontos!

A mérést követően ne hagyjuk a gyermeket felügyelet nélkül!

Tisztítás, fertőtlenítés:

A mérőeszközt a háztartásban alkalmazott tisztítószerrel nedves törlővel tisztítsuk, majd azonnal szárazra töröljük. Ne használjunk tisztításhoz agresszív anyagokat. (benzin, nitrohigító, Hypo stb.)

Fertőtlenítés: Felületi fertőtlenítő szerekkel

Tartozékok:

- **seca 207:** Csecsemő hossz mérő, tolórudas, 0-99cm-ig, 1mm osztással
- **seca 210:** Csecsemő hossz mérő, műanyag, 10-99cm-ig, 5mm osztással



seca 416



seca 210



seca 207