

ROMBUSZ SPECIÁLIS ÁGY



Rendeltetése:

A mozgásszervi rehabilitáció kiváló segédeszköze (gyógytorna, masszázs, vizsgálat stb.)

Műszaki jellemzői:

Hegesztett, beégetett festéssel védett acélszerkezet

Elektromotoros magasságállítás 390 mm: **600 – 990mm**-ig, vagy **500 – 880mm**-ig.

Vezérlése nyomógombbal történik.

Fekvőfelülete:

- Osztott fekvőfelület
- Osztott fejtámla

Osztott fekvőfelületek állításának lehetőségei:

- Arretáló szerkezettel a medence részt
- Szorító mechanikával a lábrészt

Páciensét az ágyra úgy is elhelyezheti, hogy a lábrészt háttámlaként használja.



Fejtámla állítása:

A fejtámla állítását egy gázdugattyús munkahenger végzi. Indítása a fejtámla alatti kar megnyomásával lehetséges. Állítási tartománya $\pm 30^\circ$.

Kartámlák állítása:

A kartámaszok a fejrésztől jobbra-balra helyezkednek el.

A kartámaszokat úgy tudjuk lesüllyeszteni, ha az arretáló karokat az óra járásával ellentétes irányban forgatva oldjuk, majd ismét rögzítsük le ellentétes irányú szorítással.

Forgalomba hozatal:

Rendelési száma:

CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

RO111