



DIA-MED

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740
www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

seca 456 – USB adapter a seca360° rendszerhez



Általános:

A seca456-os USB adapter segítségével, azt a számítógéphez kötve kommunikálhat a seca360° rendszerrel felszerelt seca eszközökkel. Ennek segítségével számítógépe adatokat fogadhat a kívánt seca eszköztől. Az adapter csak a seca PC szoftverrel rendelkező számítógépeken működik.

Működés:

Miután az adaptert csatlakoztattuk a számítógép egy szabad USB portjához, állítsunk fel egy WiFi hálózatot, ahogyan az le van írva a seca PC szoftver adminisztrátori kézikönyvében. Az eszközön található LED információkat szolgáltat. Amennyiben az adaptert sikeresen felismerte a számítógép, a LED pirosan, ha pedig adatközlés történik, kéken világít.

Méretek: 85 x 23 x 10 mm