
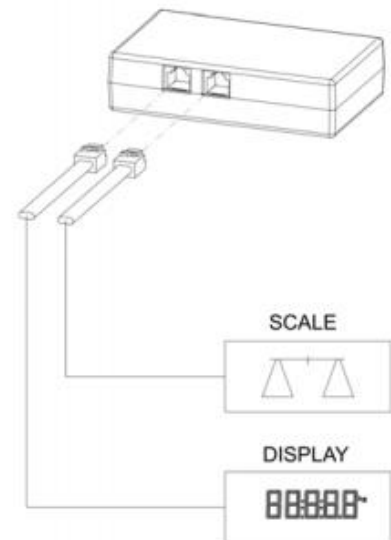


### seca 460 – Interfész

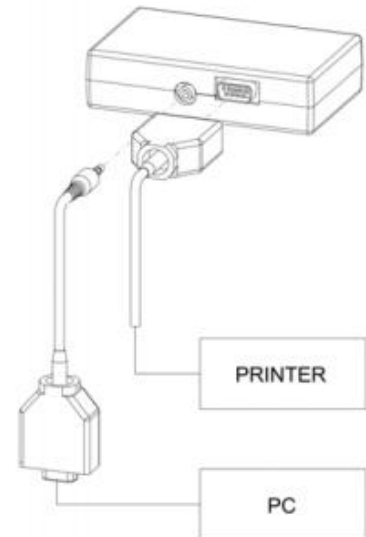

#### Adatok:

Az RS232 interfész segítségével adatokat közölhet egy soros port-tal rendelkező számítógép vagy nyomtató és az alábbi termékek között: seca645, seca685, seca644, seca684, seca676, seca664, seca656, seca674, seca763, seca634. Az interfész lehetővé teszi ezeknek az eszközöknek a közvetlen összekötését és kapcsolatba hozását. Mielőtt az adapter és a mérleg összekötése megtörténne, kérjük ellenőrizzék le, hogy a mérleg nincs a hálózathoz, illetve nyomtatóhoz, vagy számítógéphez csatlakoztatva. Üzembehozatal előtt a nyomtatón az alábbi paramétereket beállítása szükséges:

- baud arány: 9600bps
- adatbit: 8bit
- paritás ellenőrzés: engedélyes
- paritás: páros
- buffer kapacitás: maximum
- „handshake”: receive buffer full

**Méret:** 61.5 x 102.5 x 26mm